



# Szyna stabilizująca kciuk (rozmiar L-XXL) SALVI ORTOPEDIC



Cena: 35,31 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Szyna stabilizująca kciuk
Producent	PMT
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Szyna stabilizująca kciuk (rozmiar L-XXL: 22-26cm)

### Opakowanie

1 szt.

### Działanie

Szyna stabilizująca kciuk SALVI ORTOPEDIC przyspiesza leczenie przy zwichnięciach, złamaniach i innych urazach, stosowana przy przeciążeniach oraz stanach zapalnych tkanek miękkich, stawów i kości. Produkt pomaga w zabiegach i w rehabilitacji leczniczej, redukuje zmiany bólowe. Szyna stabilizująca wykazuje działanie usztywniające i ochronne.

### Wskazania

Szyna stabilizująca kciuk wskazana jest:

- przy zwichnięciach, skręceniach, złamaniach i innych urazach nadgarstka,
- do usztywnienia kontuzjowanego kciuka,
- w przypadku występowania bólu związanego z przeciążeniem nadgarstka,
- w celu wzmocnienia stawu i przyspieszenia rekonwalescencji,



- w przypadku chorób zwyrodnieniowych,
- po operacjach i zabiegach kciuka i nadgarstka,
- w zespole cieśni nadgarstka,
- w stanach zapalnych mięśni, stawów i kości.

#### Sposób użycia

- Należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni dla obwodu nadgarstka.
- Odpiąć rzepy.
- W przypadku modeli z aluminiowymi wspornikami należy upewnić się, że podpory ograniczają ruchy nadgarstka i palca.
- W modelach obejmujących kciuk należy upewnić się, że palec znajduje się w pozycji wskazanej przez lekarza.
- Przymocować rzepy.

#### Ostrzeżenia

Ten wyrób medyczny jest przeznaczony do użytku indywidualnego, przez jednego pacjenta. Jeśli lekarz zalecił stosowanie bandażu w nocy, upewnić się, że bandaż nie blokuje przepływu krwi. W przypadku drętwienia, należy poluzować bandaż lub zdjąć go całkowicie. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, skontaktować się z lekarzem. Wyrób służy do użycia w konkretnym celu, nie zaleca się łączyć z innymi produktami. Należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

#### Instrukcja prania

- Przymocować rzepy.
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Nie prać w palce.
- Jeśli to możliwe, suszyć na ręczniku, nie wieszając produktu. Nie należy używać suszarki.
- Przed użyciem upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Nie prasować.
- Materiały termoplastyczne należy czyścić wilgotną ściereczką.

#### Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym zamkniętym pudełku tekturowym w suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie wilgoci i bezpośredniego ciepła lub światła słonecznego.

#### Skład

70% nylon, 19% poliester, 7% elastan, 4% gąbka. Posiada skręconą aluminiową podporę.